

Nettoyage et désinfection des équipements d'hydrothérapie

Baignoires standards, civières-douches, douches, chaises-leviers et toiles

Un usager en précautions additionnelles (contact allégé exclus) **ne doit pas** recevoir ses soins d'hygiène dans ces équipements.

ÉTAPE 1 : NETTOYAGE

- 1 **Vider** la baignoire
- 2 **Procéder** à l'hygiène des mains
- 3 **Revêtir** l'équipement de protection individuelle (EPI) selon les pratiques de base
- 4 **Rincer à l'eau** toutes les surfaces et les accessoires
- 5 **Appliquer le produit** nettoyant/désinfectant, prêt à l'usage (RTU) ou provenant du **dilueur**, sur toutes les surfaces et les accessoires
- 6 **Frotter** toutes les surfaces et les accessoires, y compris le dessous de la chaise, avec un linge en microfibre
- 7 **Rincer** toutes les surfaces
- 8 **Placer** le linge souillé à l'endroit désigné

ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION

- 1 **Appliquer le produit** nettoyant/désinfectant, prêt à l'usage (RTU) ou provenant du **dilueur**, sur toutes les surfaces et les accessoires
- 2 **Frotter** toutes les surfaces et les accessoires, y compris le dessous de la chaise, avec un linge en microfibre
- 3 **Laisser agir** → 1 minute le produit prêt à l'usage (RTU)
→ 5 minutes le produit provenant du **dilueur**
- 4 **Rincer à l'eau** toutes les surfaces
- 5 **Assécher** les surfaces avec un linge en microfibre sec
- 6 **Placer** les linges souillés à l'endroit désigné
- 7 **Retirer l'EPI** et procéder à l'hygiène des mains



Nettoyage et désinfection des baignoires avec hydromassage et à turbine

Un usager en précautions additionnelles (contact allégé exclus) **ne doit pas** recevoir ses soins d'hygiène à la baignoire.

ÉTAPE 1 : NETTOYAGE

- 1 **Vider** la baignoire
- 2 **Procéder** à l'hygiène des mains
- 3 **Revêtir** l'équipement de protection individuelle (EPI) selon les pratiques de base
- 4 **Rincer à l'eau** toutes les surfaces et les accessoires
- 5 **Appliquer le produit** nettoyant/désinfectant provenant du **dilueur** sur toutes les surfaces et les accessoires
- 6 **Frotter** toutes les surfaces et les accessoires, y compris le dessous de la chaise, avec un linge en microfibre
- 7 **Rincer** toutes les surfaces
- 8 **Placer** le linge souillé à l'endroit désigné

ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION

- 1 **Appliquer le produit** nettoyant/désinfectant provenant du **dilueur** sur toutes les surfaces et les accessoires
- 2 **Frotter** toutes les surfaces et les accessoires, y compris le dessous de la chaise, avec un linge en microfibre
- 3 **Laisser agir 5 minutes** le produit provenant du **dilueur**

Baignoires avec hydromassage

- 4 **Remplir** la baignoire du produit nettoyant/désinfectant provenant du **dilueur** jusqu'à 2 pouces au-dessus des jets d'eau
- 5 **Faire fonctionner** les jets d'eau pendant 5 minutes
- 6 **Arrêter les jets d'eau** et vider la baignoire
- 7 **Rincer à l'eau** toutes les surfaces
- 8 **Remplir d'eau** la baignoire jusqu'à l'immersion des jets d'eau et les faire fonctionner pendant au moins 5 minutes
- 9 **Arrêter les jets d'eau** et vider la baignoire

Baignoires à turbine

- 4 **Remplir** la baignoire du produit nettoyant/désinfectant provenant du **dilueur** jusqu'à l'immersion des turbines
- 5 **Faire fonctionner** les turbines pendant 15 minutes
- 6 **Arrêter les turbines** et vider la baignoire
- 7 **Rincer à l'eau** toutes les surfaces
- 8 **Remplir d'eau** la baignoire jusqu'à l'immersion des turbines et les faire fonctionner pendant au moins 5 minutes
- 9 **Arrêter les turbines** et vider la baignoire

- 10 **Assécher** toutes les surfaces avec un linge en microfibre sec
- 11 **Placer** les linges souillés à l'endroit désigné
- 12 **Retirer l'EPI** et procéder à l'hygiène des mains