

Procédure de nettoyage/désinfection du matériel non critique qui se nettoie/désinfecte facilement

Matériel qui touche la peau intacte de l'utilisateur, mais non les muqueuses

Produit désinfectant

EXEMPLES (non exhaustifs)



PROCÉDURE :

1. Procéder à l'hygiène des mains;
2. Mettre des gants;
3. Frotter les surfaces fréquemment touchées « High touch » avec une lingette ou un linge imbibé de peroxyde d'hydrogène*;
4. Procéder en débutant par la surface la moins souillée vers la plus souillée;
5. En présence de souillures visibles, répéter l'étape 3 avec un nouveau linge imbibé ou une nouvelle lingette;
6. S'assurer que la surface demeure humide selon le temps de contact recommandé par le fabricant;
7. Rincer et assécher après la désinfection si utilisation sur des matériaux tels que cuivre, laiton, aluminium, bronze, zinc, dispositifs à extrémité en carbone ainsi que certains revêtements souples (ex. : silicone et plastique);
8. Retirer les gants;
9. Procéder à l'hygiène des mains.

* Selon certaines situations (ex. : C difficile), il pourrait être recommandé d'utiliser un produit reconnu sporicide. Au besoin, consulter le Service de PCI.

Laveuse/sécheuse

EXEMPLES (non exhaustifs)



Source des images : Google

PROCÉDURE :

1. Laver à la machine à l'eau chaude avec un détergent
2. Sécher à la machine

N. B. : Pour tout équipement de tissu qui présente un enjeu de sécurité (ex. : toile de lève-personne), suivre les recommandations du fabricant lorsque celles-ci diffèrent de la présente procédure.

Lave-vaisselle (si disponible)

PROCÉDURE :

Faire un cycle normal avec du détergent suivi d'un cycle de séchage
Si lave-vaisselle non disponible pour laver la vaisselle, se référer aux normes du MAPAQ¹

¹ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)